

AOCシステム クイックリファレンス

起動方法

CDをセットし、「コンピュータ」から「ドライブ」を右クリック→開く→「画像参照ソフト起動.vbs」をクリックします。

「診断画像ディスク」のウィンドウで「専用ビューワで見る」をクリックします※①。

専用ビューワを起動したら、検査※②を選択し、

「表示」※③をクリックすると、画像が表示されます。

- DICOM
- IHE_PDI
- VIEWER
- VINFO
- autorun.inf
- DICOMDIR
- INDEX.HTM
- README.TXT

画像参照ソフト起動.vbs



②AOCminiが起動したら、検査を選択し「表示」をクリックすると、ビューワが起動します。



※画像データの容量によっては、画像の読み込みに時間がかかる場合がございます。

■AOC Stackatoの全体図および各部名称



タイムライン

同じ患者の画像を示すアイコン（タイムボックス）が検査日ごとに並んで表示されます。

セル

実際に画像を表示し、ビューするスペースです。ここにシリーズリストから表示させたいシリーズ画像を選択、もしくはドラッグ&ドロップで割り当て、ビューします。

インフォメーションパレット

カレント画像のトーン（明るさ・コントラスト）や位置情報が表示されます。

シリーズリスト

選択中のタイムボックスに含まれているシリーズの代表画像の一覧が表示されます。

オーバービューウィンドウ

選択している画像の全体像が表示されます。

ツールバー

ユーザーがよく利用するツールがまとめられています。

■移動・ズームを行う



移動・ズーム アイコン

「移動・ズーム」アイコンを選択し、左クリックをしながら動かすと画像を移動させることができます。右クリックをしながら上下に動かすと画像の拡大/縮小ができます。


■トーンを変更する



トーン アイコン

「トーン」アイコンを選択し、左クリックをしながら、左右に動かすと「明るさ」、上下に動かすと「コントラスト」を調節できます。

■セル分割数を変更する

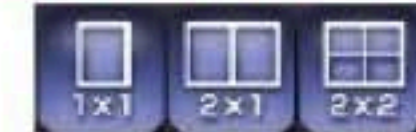

セル分割数 アイコン

ビューエリアに表示する画像の数を変更できます。